


(スポークカバー取扱説明書)

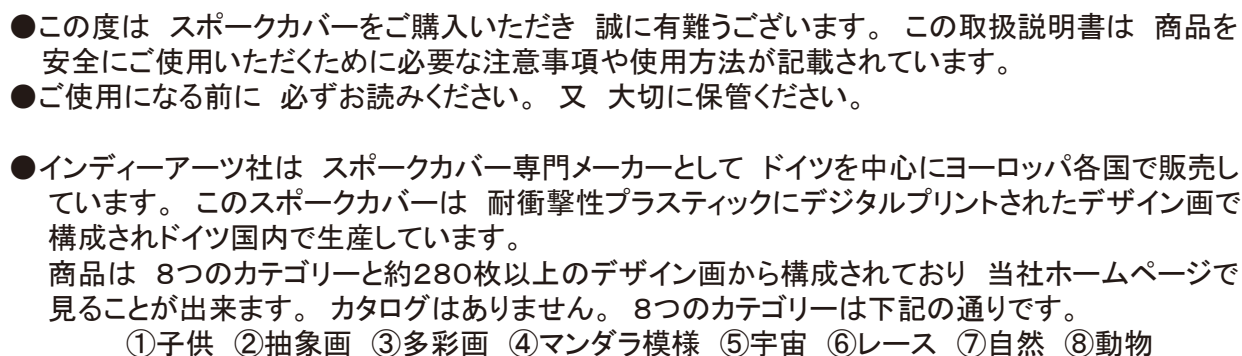

1. 商品番号について

- 1) 発注に必要なデザイン画の商品番号は 下記の①～④を実施することで見つけることができます。
 - ①スポークカバーのホームページを開き 画面下部の8つのカテゴリ別デザイン画の中から 希望するカテゴリ画をクリックする。
 - ②1つのカテゴリに入っているデザイン画が一覧できます。
 - ③その一覧のデザイン画から 1つだけを選択し クリックすると 拡大されたデザイン画が現れます。
 - ④拡大されたデザイン画の下部に 商品番号が表示されています。




商品番号－2072

2. 適用車輪

- 1) 対象となる車輪は 16・20・22・24インチの4種類 となります。 お好みの外輪径で スポークカバーを作ることも出来ます。 * 26インチが必要な場合 販売店にご相談ください。


3. スポークカバーの内輪径

- 1) 車軸の着脱のために 商品の中心部に穴(内輪)を空けます。
- 2) 商品の内輪径は 14cm と 内輪無し と 内輪径希望寸法の 3種類から選択してください。
但し クイックリリースの車軸をご使用の場合 内輪径が小さすぎると 着脱の際 指が入りにくく着脱がやり難くなります。
参考として ドイツでは14cm内輪径が標準サイズとなっています。

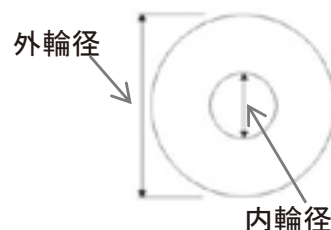


4. ハンドリム支柱数

- 1) スポークカバーを取付けるとき ハンドリムの支柱が邪魔にならないように外輪部(下の図参照)にカットを入れ くぼみの加工をします。
- 2) ハンドリムを車輪に固定するために支柱が付いています。 メーカーによって異なりますが 基本的には支柱の数は 4・5・6本のいずれかとなりますので 適用するものを選択ください。
- 3) ハンドリムを車輪に取付けず スポークカバーのみを装着する場合 支柱無し を選択してください。
支柱避けカット部分が無い丸い状態の商品となります。

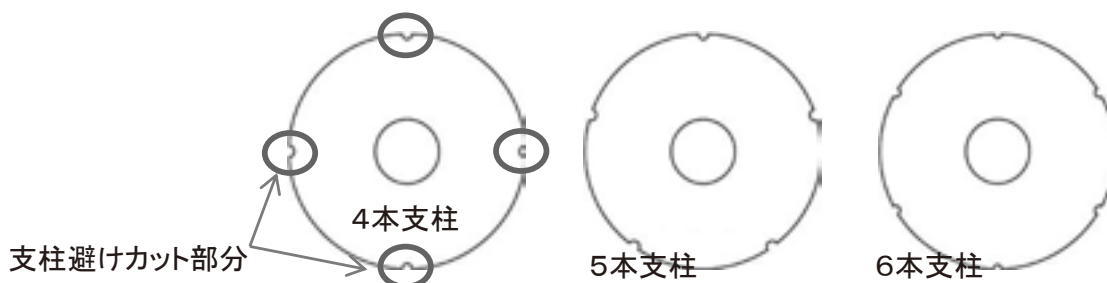

5. 取付方法

- 1) 商品を車輪に取付ける場合 標準で7・5・3穴と穴無しから 選択できます。スポーク数により必要な穴数が違います。
- 2) 取付方法は 2つの方法で取付けます。 1つはクリップ式、もう一つは結束バンド式(インシュロック)です。お好みに合わせて選択下さい。
- 3) 6本スポークのマグホイールの車輪の場合でも 結束バンド式を使えば取付けることができます。
但し 形状によっては取付けられない場合もあります。

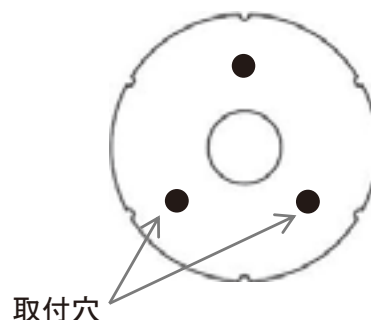

* この資料とともに 最終ページの「スポークカバークリップ止めの取付方法」をご参照下さい。

6. ご使用上の注意事項

- 1)スポークカバーを取付けた後 クリップや結束バンドでしっかり装着されていることをご確認ください。
- 2)装着されたスポークカバーの外輪や内輪の隙間に手や指を挟まないように注意してご使用ください。
- 3)使用中に クリップや結束バンドがはずれた場合 安全の為すみやかに補給して装着してください。
- 4)スポークカバーを炎天下での車内やトランク内また高温化した場所に放置した場合 変形する恐れがありますので、日陰や風通しの良い場所に保管してください。
- 5)ひび割れ等 破損したスポークカバーは危険ですので交換してください。
- 6)商品の清掃は 柔らかい布やスポンジを使用し 石鹸と水洗いで汚れを落としてください。
その他の洗剤やワックス・化学薬品等は使用しないでください。
劣化による破損やひび割れ等の原因になります。
- 7)取付作業を行う前に クリップ等構成部品が同梱されているかを確認して作業してください。
- 8)スポークカバーを取付けるためのクリップは ハードタイプの樹脂を使用していますので装着する際力を入れて取付けてください。

◆クリップ式



7. 適用車輪

適用車輪	16インチ	20インチ	22インチ	24インチ
スポークカバーの外輪径	約29cm	約41cm	約46cm	約51cm
	外輪径希望寸法			
スポークカバーの内輪径	14cm ・ 内輪無し ・ 内輪径希望寸法			
ハントリム固定支柱数	4ヶ所 ・ 5ヶ所 ・ 6ヶ所 ・ 支柱無し			
取付方法	クリップ式 ・ 結束バンド式			
取付穴数	7穴 ・ 5穴 ・ 3穴			

* 車輪・スポークの形状によっては 取付けられない場合があります。

8. 保証期間

- 1)この商品の保証期間は 1ヶ月となります。 但し 破損状況によっては対象にならない場合があります。

* 不明な点がありましたら、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

9. スポークカバーのクリップ止めの取付方法



1

クリップを60度以上のお湯に10分程度つけます。



2

スポークカバーの穴に対し、クリップの溝を垂直方向に立ててあてがいます。



3

ゆっくりとクリップを立てて、図のように穴に平行にします。



4

両手でクリップを押し、しっかりと奥まで差し込んでください。



5

車いすのスポークの位置に合わせてスポークカバーをセットし、クリップの向きをスポークに合わせます。



6

すべてのスポークとクリップの位置と向きがそろったら、各クリップをゆっくりと押し込み、スポークに固定します。